



10 zlatih pravil za merjenje temperature v ušesu in na čelu

- 1.) 


Pred vsako meritvijo preverite, ali je steklena leča merilnega senzorja čista, brez maščobe in brez prask. Če je senzor umazan, lahko to povzroči nepravilne meritve temperature ali celo prenos okužb med različnimi uporabniki.

OPOZORILO:


 - Očistite konico senzorja in steklene leče takoj po merjenju, predvsem po uporabi v ušesu.
 - Ostanki grobe umazanije ali ušesnega masla se lahko odstranijo s konice senzorja in steklene leče z vatiranimi paličicami.
 - Za optimalno čiščenje uporabljajte priložene krpice (Soft-Zellin).

- 2.) 


Po čiščenju senzorja s priloženimi alkoholnimi krpicami počakajte vsaj 15 minut pred naslednjim merjenjem. V tem času bo termometer dosegel potrebno delovno temperaturo, saj je čiščenje povzročilo učinek izhlapevanja in s tem ohlajanja.

- 3.) 


Poskrbite, da sta termometer in oseba, ki si bo merila temperaturo, na sobni temperaturi vsaj 30 minut pred merjenjem.

- 4.) 

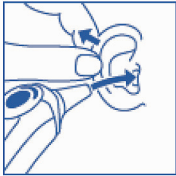
Ne merite temperature, če je čelo ali uho vlažno, potno ali mokro. Meritve ne smete izvajati v ušesu ali na čelu, ki kaže znake vnetnih bolezni, izpuščajev, poškodb itd.

- 5.) 

Uho mora biti čisto in brez ušesnega masla. Da bi zagotovili optimalno natančnost merjenja, s čela odstranite lase, pot, kozmetiko ali umazanijo.

- 6.) 

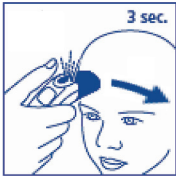
Ne merite temperature, če ste počivali na ušesu ali na čelu. Počakajte nekaj časa, da se pregreto delo telesa zmanjša. Podobno lahko na napačno meritev telesne temperature vplivajo lasje in poraščenost v ušesu.

- 7.) 

Pri merjenju v ušesu morate senzor pravilno in dovolj globoko vstaviti v ušesni kanal.

OPOZORILO:


 - Raztegnite ušesni kanal tako, da potegnete sredino zunanega ušesa obenem nazaj in navzgor. Pri otrocih, mlajših od enega leta, potegnite uho le nazaj.
 - Previdno vstavite konico termometra v ušesni kanal, dokler na začutite rahlega upora.

- 8.) 

Površino nastavka za čelno meritev namestite na sredino čela, približno 1 cm nad obrvmi. Nato v treh sekundah premaknite termometer od tam proti sencam.

OPOZORILO:

 - Termometer premikajte nežno in brez pritiska na kožo med merjenjem.
 - Termometer izmeri najbolj točne vrednosti, če merite v območju nad obrvmi proti sencam.

- 9.) 

Poskrbite, da je pri merjenju v ušesu ali na čelu na termometru prikazana pravilna ikona za uho ali čelo. Le v primeru, da je na zaslonu prikazan pravi simbol po merjenju temperature, je rezultat merjenja zanesljiv.

- 10.)

Temperaturne vrednosti se lahko razlikujejo od ušesa do ušesa. Zato prosimo, da vedno merite temperaturo v istem ušesu. Tudi pri merjenju na čelu vsakokrat odčitajte isto področje. V nasprotnem primeru lahko pride do razlik pri meritvah.

OPOZORILO:

 - Da bi zagotovili največjo natančnost zaporednih meritev, temperaturo merite v intervalih po 30 sekund.
 - Priporočamo meritev telesne temperature v zdravem stanju, da bi ugotovili normalne vrednosti za uho ali čelo. Tudi tu velja, da vedno merite temperaturo v istem ušesu in na predelu čela.



Prosimo, da pred uporabo pozorno preberite Navodila za uporabo, ki so priložena napravi. Pravilno merjenje temperature je odvisno od pravilne uporabe naprave. Navodila opisujejo posamezne korake merjenja temperature s termometrom Thermoval® duo scan in vsebujejo pomembne in uporabne nasvete za zanesljivo določanje telesne temperature. Priročnik shranite za morebitno kasnejšo uporabo.